

Document de configuration Appel malade – Gravelone

Matériel et fonctionnalités – Soins

Pagers

Constructeur					
TYPE	unité	Sous unite	Quantité	Type (soins, veilleuse)	Divers
android	unité1		3	infirmières	étage 2eme/3eme
android	unité2		3	infirmières	étage Rez/1er
android	unité1	Su1.1	4	soins	étage 2eme/3eme
		Su1.2	4	soins	étage 2eme/3eme
		Su1.3	4	soins	étage 2eme/3eme
android	unité2	Su2.1	4	soins	étage Rez/1er
		Su2.2	4	soins	étage Rez/1er
		Su2.3	4	soins	étage Rez/1er
android	veilleuse1		1	veilleuses	étage 2eme/3eme
android	veilleuse2		1	veilleuses	étage Rez/1er
android	direction		2	direction	Espace general
android	technique		4	technique	Espace general
android	cuisine		2	technique	Espace general

Téléphones wifi

Constructeur		Spectralink				
TYPE	Unité (unité 1)	liste de distribution (technique)	Quantité (1)	Type (soins, veilleuse, ...)	Appel urgence (1)	Divers (nom du device)
8440						
8440						

Android

	Constructeur		Android			
TYPE	Unité d'organisation	liste de distribution	Quantité	Type (soins, veilleuse)	PTT	Divers
android	unité1	infirmieres1	3	responsables	0	infirmiere1.1, infirmiere1.2, infirmiere1.3
android	unité2	infirmieres2	3	responsables	0	infirmiere2.1, infirmiere2.2, infirmiere2.3
android	unité1	SU1.1	4	soins	0	soins1.1.1, soins1.1.2, soins1.1.3, soins1.1.4,
		SU1.2	4	soins	0	soins1.2.1, soins1.2.2, soins1.2.3, soins1.2.4,
		SU1.3	4	soins	0	soins1.3.1, soins1.3.2, soins1.3.3, soins1.3.4,
android	unité2	SU2.1	4	soins	0	soins2.1.1, soins2.1.2, soins2.1.3, soins2.1.4,
		SU2.2	4	soins	0	soins2.2.1, soins2.2.2, soins2.2.3, soins2.2.4,
		SU2.3	4	soins	0	soins2.3.1, soins2.3.2, soins2.3.3, soins2.3.4,
android	unité1	Veilleuse1	1	veilleuses	0	Veilleuse1
android	unité2	Veilleuse2	1	veilleuses	0	Veilleuse2
android		direction	2	direction	0	direction, inf.chef
android		technique	4	technique	0	technique1, technique2, technique3, technique4,
android		cuisine	2	technique	0	cuisine1, cuisine2

Version	Date	Auteur	Telephone	Appel malade	
1.0	11-mai-15	L.Bazin de Jessey	+41269139000		Page 2 of 12

Watchtags

	Constructeur	Ekahau			
TYPE	unité (unité 1)	Quantité patients (4)	Quantité de tags actifs (5 max)	Réserve (ex : 20 %)	Divers
W4	unité1	37	37	10	
W4	unité2	35	35	10	
W4	réserve RMA	-	-	2	
W4					
W4					
W4					
W4					

Tapis sonnette

	Constructeur	Bircher			
TYPE	Modèle	Unité	Quantité de tags actifs	Réserve	Divers
Technique					
technique					

Alarmes techniques

Tags

TYPE	Constructeur	Ekahau		
	Relais	Heure d'activation	Quantité	Automatique
Alarme chauffage	?	00:00 – 24:00	1	?
ventilation	?	00:00 - 24:00	1	?
Pompe relevage	?	00:00 – 24:00	1	?
Asservissement	?	00:00 – 24:00	1	?
Feu	?	00:00 – 24:00	1	?
Dérangement Feu	?	00:00 – 24:00	1	?
frigo congel.	?	00:00 – 24:00	1	?
frigo lait	?	00:00 – 24:00	1	?

Configuration HealthcareWireless

Récepteurs

	Constructeur	Healthcarewireless	
Recepteurs			
liste de distribution/Unité	Status	horaire	Divers
infirmieres1	Actif	07:00 – 21:00	
infirmieres2	Actif	07:00 – 21:00	
SU1.1, SU1.2, SU1.3	Actif	07:00 – 12:00	
SU2.1, SU2.2, SU2.3	Actif	07:00 – 12:00	
Unité1	Actif	12:00 – 21:00	
Unité2	Actif	12:00 – 21:00	
Veilleuse1	Actif	20:45 – 07:15	
Veilleuse2	Actif	20:45 – 07:15	
direction	Actif	06:45 – 21:15	
technique	Actif	06:00 – 21:00	
cuisine	Actif	06:00 – 21:00	

Alarmes tapis

	Constructeur			
TYPE d'alarme	Heure d'activation <i>(unite 1)</i>	Quantité <i>(10)</i>	Réserve	Divers
tapis	00:00 – 24 :00			
Dénomination				

Notifications

		Constructeur	Healthcarewireless
Notifications			
Unité	type	Destinataire	Escalations
EG	Batterie tag technique basse	technique, Veilleuse1, Veilleuse2, cuisine	
	Alarme feu	direction, technique, Veilleuse1, Veilleuse2, cuisine	
	Alarme technique	direction, technique, Veilleuse1, Veilleuse2, cuisine	
	Alarme dérangement feu	direction, technique, Veilleuse1, Veilleuse2, cuisine	
SU1.1	Batterie du tag basse	infirmiere1, Veilleuse1	
	Batterie Tag tapis basse	technique, Veilleuse1, Veilleuse2, cuisine	
	Appel malade + Tapis	soins1.1.1, soins1.1.2, soins1.1.3, soins1.1.4, soins1.1.5, Veilleuse1	5 minutes : infirmieres1, Veilleuse2 10 minutes : direction
	Système anti-errance	soins1.1.1, soins1.1.2, soins1.1.3, soins1.1.4, soins1.1.5, Veilleuse1, infirmieres1, inf. chef	
SU1.2	Batterie du tag basse	infirmieres1, Veilleuse1	
	Batterie Tag tapis basse	technique, Veilleuse1, Veilleuse2, cuisine	
	Appel malade + Tapis	soins1.2.1, soins1.2.2, soins1.2.3, soins1.2.4, soins1.2.5, Veilleuse1	5 minutes : infirmieres1, Veilleuse2 10 minutes : direction
	Système anti-errance	soins1.2.1, soins1.2.2, soins1.2.3, soins1.2.4, soins1.2.5, Veilleuse1, infirmieres1, inf. chef	
SU1.3	Batterie du tag basse	infirmieres1, Veilleuse1	
	Batterie Tag tapis basse	technique, Veilleuse1, Veilleuse2, cuisine	
	Appel malade + Tapis	soins1.3.1, soins1.3.2, soins1.3.3, soins1.3.4, soins1.3.5, Veilleuse1	5 minutes : infirmieres1, Veilleuse2 10 minutes : direction
	Système anti-errance	soins1.3.1, soins1.3.2, soins1.3.3, soins1.3.4, soins1.3.5, Veilleuse1, infirmieres1, inf. chef	
SU2.1	Batterie du tag basse	infirmieres2, Veilleuse2	
	Batterie Tag tapis basse	technique, Veilleuse1, Veilleuse2, cuisine	
	Appel malade + Tapis	soins2.1.1, soins2.1.2, soins2.1.3, soins2.1.4, soins2.1.5, Veilleuse2	5 minutes : infirmieres2, Veilleuse1 10 minutes : direction
	Système anti-errance	soins2.1.1, soins2.1.2, soins2.1.3, soins2.1.4, soins2.1.5, Veilleuse2, infirmieres2, inf. chef	
SU2.2	Batterie du tag basse	infirmieres2, Veilleuse2	
	Batterie Tag tapis basse	technique, Veilleuse1, Veilleuse2, cuisine	
	Appel malade +	soins2.2.1, soins2.2.2, soins2.2.3, soins2.2.4, soins2.2.5, Veilleuse2	5 minutes : infirmieres2, Veilleuse1

Version	Date	Auteur	Telephone	Appel malade
1.0	11-mai-15	L.Bazin de Jessey	+41269139000	Page 6 of 12

	Tapis		10 minutes : direction
	Système anti-errance	soins2.2.1, soins2.2.2, soins2.2.3, soins2.2.4, soins2.2.5, Veilleuse2, Veilleuse2, infirmieres2, inf. chef	
SU2.3	Batterie du tag basse	infirmieres2, Veilleuse2	
	Batterie Tag tapis basse	technique, Veilleuse1, Veilleuse2, cuisine	
	Appel malade + Tapis	soins2.3.1, soins2.3.2, soins2.3.3, soins2.3.4, soins2.3.5, Veilleuse2	5 minutes : infirmieres2, Veilleuse1 10 minutes : direction
	Système anti-errance	soins2.3.1, soins2.3.2, soins2.3.3, soins2.3.4, soins2.3.5, Veilleuse2, infirmieres2, inf. chef	
Unité1	Batterie du tag basse	infirmieres1, Veilleuse1	
	Batterie Tag tapis basse	technique, Veilleuse1, Veilleuse2, cuisine	
	Appel malade + Tapis	soins1.1.1, soins1.1.2, soins1.1.3, soins1.1.4, soins1.1.5, soins1.2.1, soins1.2.2, soins1.2.3, soins1.2.4, soins1.2.5, soins1.3.1, soins1.3.2, soins1.3.3, soins1.3.4, soins1.3.5, Veilleuse1	5 minutes : infirmieres1, Veilleuse2 10 minutes : direction
	Système anti-errance	soins1.1.1, soins1.1.2, soins1.1.3, soins1.1.4, soins1.1.5, soins1.2.1, soins1.2.2, soins1.2.3, soins1.2.4, soins1.2.5, soins1.3.1, soins1.3.2, soins1.3.3, soins1.3.4, soins1.3.5, Veilleuse1, infirmieres1, inf. chef	
Unité2	Batterie du tag basse	infirmieres2, Veilleuse2	
	Batterie Tag tapis basse	technique, Veilleuse1, Veilleuse2, cuisine	
	Appel malade + Tapis	soins2.1.1, soins2.1.2, soins2.1.3, soins2.1.4, soins2.1.5, soins2.2.1, soins2.2.2, soins2.2.3, soins2.2.4, soins2.2.5, soins2.3.1, soins2.3.2, soins2.3.3, soins2.3.4, soins2.3.5, Veilleuse2	5 minutes : infirmieres2, Veilleuse1 10 minutes : direction
	Système anti-errance	soins2.1.1, soins2.1.2, soins2.1.3, soins2.1.4, soins2.1.5, soins2.2.1, soins2.2.2, soins2.2.3, soins2.2.4, soins2.2.5, soins2.3.1, soins2.3.2, soins2.3.3, soins2.3.4, soins2.3.5, Veilleuse2, infirmieres2, inf. chef	

Version	Date	Auteur	Telephone	Appel malade	
1.0	11-mai-15	L.Bazin de Jessey	+41269139000		Page 7 of 12

Utilisateurs

TYPE	Mots de passe		Accès	
	ID	mdp	Unité	Divers
infirmier chef	infchef	infchef	-	
technique	technique	technique	-	
veilleuses	veilleuses	veilleuses	-	
direction	direction	direction	-	
Unité 1	soins1	soins1	unité 1	
Unité 2	soins2	soins2	unité 2	
réception	reception	reception	-	

Droits Gestion des données

TYPE	personnel	patient	alarme feu	dérangement feu	alarmes tapis	alarme technique
infirmier chef	x	x	0	0	x	0
technique	x	x	x	x	x	x
veilleuses	0	0	0	0	0	0
direction	x	x	x	x	x	x
Unité 1	0	x	0	0	0	0
Unité 2	0	x	0	0	0	0
réception	0	0	0	0	0	0

Droits Déroulement et accès historique

TYPE	attribution	échange	desattribution	Analyse
infirmier chef	x	x	x	x
technique	x	x	x	x
veilleuses	x	x	x	0
direction	x	x	x	x
Unité 1	x	x	x	0
Unité 2	x	x	x	0
réception	0	0	0	0

Droits Moniteurs

TYPE	alarmes unité xxx	batteries unité xxx basse	batteries tech	batteries tech basses	batteries soins	Réception	Alarmes techniques
infirmier chef	0	0	x	x	x	x	x
technique	0	0	x	x	x	x	x
veilleuses	0	0	0	x	x	0	0
direction	x	x	x	x	x	x	x
Unité 1	x	x	0	x	x	0	0
Unité 2	x	x	0	x	x	0	0
réception	0	0	0	0	0	0	0

Anti Errance

BEACONS

		Constructeur	EKAHOU		
TYPE	Modèle	quantité	Firmware/version	Emplacement	Divers
IR	LB1				
	LB2				
Modèle	nom	mode	Blink interval	power	
LB					

A4

		Constructeur	Ekahau		
TYPE	Modèle	quantité	Firmware/version	Emplacement	Divers
Porte	NF				
	NO				
nom	Heure de service				

Antennes

		Constructeur	Avaya		
TYPE	AP Groupe	quantité	AP IP	AP Type	Switch IP
Outdoor					
Indoor					

Récapitulatif matériel

Matériel Supervision

	Constructeur	DELL			
TYPE	Modèle	Quantité	Firmware/version	Unité	Divers
OS			windows 8		
Ecran	touch screen	2			

Matériel HealthcareWireless

	Constructeur	Ekahau			
TYPE	Modèle	Quantité	Firmware/version	Divers	
T301	A	0			
	A4+	0			
	A4	8			
	supports A4	8			
	W	0			
	W4	94		72 patients	
Pagers	B4	0			
	Bd	0			
Beacon	LB1	0			
	LB2	0			
Autres	android	41			
Licenses Ekahau	94 watches + 8 techniques = 102				
Chargeurs	Watch	2			
	pagers	0			

Matériel Téléphonie pour réception d'alarmes

	Constructeur	Spectralink			
TYPE	Modèle	Quantité	Firmware/version	Emplacement	Divers
Téléphone	8440				
chargeur	Avec Dock				
	Sans Dock				

Matériel BIRCHER

	Constructeur	Bircher			
TYPE	Modèle	Quantité	Firmware/version	Emplacement	Divers
Tapis	Tapis contact neuf				
Matelas	Matelas				
Tapis	Tapis contact reprise				

Version	Date	Auteur	Telephone	Appel malade	
1.0	11-mai-15	L.Bazin de Jessey	+41269139000		Page 11 of 12

Acceptation

Résumé et actions futures

Pour LPS :

- Les fonctionnalités Anti-errance doivent être détaillées (zones)
- La quantité de licences anti-errantes doit être détaillée

Pour Gravelone:

- 1 tag de type A4 est en prêt actuellement sur site. Utilisé pour des tests d'alarmes tapis, il doit être retourné à LPS, ou acheté par le client.
- 1 tag de type A4+ est en prêt actuellement sur site. Utilisé pour des tests d'alarmes techniques, il doit être retourné à LPS, ou acheté par le client.
- 7 tags techniques de type A4 et leur socle de montage doivent être retournés à LPS.

Villars sur Glâne, le 11 mai 2015

Pour l'Etablissement

Pour LPS Services
Louis Bazin de Jessey



Version	Date	Auteur	Telephone	Appel malade	
1.0	11-mai-15	L.Bazin de Jessey	+41269139000		Page 12 of 12